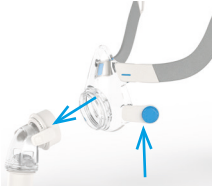
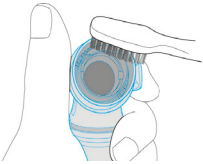

Merkblatt

Reinigung Kniestück für AirFit F20-Masken

Ablauf der Reinigung des Kniestücks für AirFit F20-Masken

- | | | | | | |
|----|---|---|----|--|---|
| 1. |  | Drücken Sie auf die beiden weissen Knöpfe auf der Seite der Maske und ziehen Sie das Kniestück von der Maske ab. | 4. |  | Spülen Sie unter fliessendem Wasser das Kniestück gründlich ab. |
| 2. |  | Weichen Sie in einem warmen Wasserbad mit einem milden Flüssigreiniger das Kniestück für etwa 10 Minuten auf. | 5. |  | Nun lassen Sie das Kniestück lufttrocknen. Achten Sie darauf, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. |
| 3. |  | Für mindestens eine Minute sollten Sie das Kniestück im Wasser kräftig schütteln und mit der Hand oder einer weichen Bürste reinigen. Insbesondere die Verbindungsteile, Ventile und Ausatemöffnungen sind wichtig zu reinigen. | | | Wenn das Kniestück nicht erkennbar sauber ist, wiederholen Sie die Reinigungsschritte. |

Achtung!

Das Kniestück muss immer vollkommen trocken sein, bevor es zum Einsatz kommt.



Eine tägliche Reinigung des Kniestücks oder nach jedem Einsatz wird empfohlen. Zudem sollten auch das Kissen und der Rahmen täglich gereinigt werden. Das Kopfband können Sie einmal in der Woche reinigen.



Damit die Qualität Ihrer Maske hoch bleibt und die Ausbreitung von Keimen vorgebeugt wird, ist eine regelmässige Reinigung nötig. Ansonsten könnte Ihre Gesundheit beeinträchtigt werden.



Wenn das Kniestück Ihrer Maske beschädigt ist, dann setzen Sie sich am besten mit Ihrem Leistungserbringern in Verbindung. Es kann sein, dass das Kniestück ersetzt werden muss.

Weitere Hinweise:

- Tipps beim Schwitzen mit der Maske
- Video Pflege der Maske



August 2026

LUNGE ZÜRICH

The Circle 62, 8058 Zürich-Flughafen
T 044 268 20 00, F 044 268 20 20, beratung@lunge-zuerich.ch
www.lunge-zuerich.ch, Spendenkonto: CH62 0900 0000 8000 1535 7